

Produktinformationen "Moor-Wärmeträger"

Der Moor-Wärmeträger ist mit 4 kg naturbelassenem Moor gefüllt und wird als Wärmespeicher z. B. für das Erwärmen von Moor-Einmalpackungen verwendet. Der Wärmeträger hat ein Maß von 56 x 38 cm und wird zu 3 Stück im Karton verpackt.

Anwendungsweise: Der Wärmeträger wird auf die zu behandelnde Stelle des Körpers aufgelegt und der Patient mit Folien und Decken gut eingepackt. Der Wärmeträger wird mit besonders gutem Erfolg in Verbindung mit Heilmoorpackungen N (Einwegpackungen) benutzt. Der Wärmeträger ist nicht dazu gedacht oder konstruiert, als Unterlage verwendet zu werden.

Der Wärmeträger beinhaltet einen Wärmespeicher bestehend aus einer Naturmoorfüllung. Die Außenfolie hat eine äußerste Hitzebeständigkeit von 80° C. In einem Wasserbad wird der Wärmeträger auf ca. 50 - 60 ° C erwärmt. Die regelmäßige Erwärmungstemperatur sollte 60 ° C nicht überschreiten. Wird der Wärmeträger in einem Wasserbad erwärmt, darf er nicht mit dem Boden des Erwärmungsgerätes in Berührung kommen, da die Folie durch Überhitzung beschädigt werden könnte. Ein Abstandshalter im Aufbereitungsgerät (Abstandssieb) verhindert den Kontakt des Wärmeträgers mit dem Boden, unter dem sich die Heizeinheit befindet. Die Folie wird dann vor der hohen Temperatur der Bodenplatte geschützt. Stark kalkhaltiges Wasser kann zum Auslaugen der Folie des Wärmeträgers führen. Falls die Möglichkeit besteht, entkalktes Wasser in das Wasserbad zu füllen, sollte dies unbedingt genutzt werden. Das Thermostat am Gerät (Wärmeschrank und/oder Wasserbad) ist auf korrekte Temperatureinstellung und Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

Reinigung: Die Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln ist zu vermeiden. Wenn die o.g. Punkte zur Pflege beachtet werden, lässt sich die Lebensdauer unserer Wärmeträger erhöhen.

Garantie/Nutzungsdauer: Das Produkt wird mit einer Garantiezeit von 3 Monaten ausgeliefert.

Hinweis bezüglich der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR): Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1, das nach Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) reguliert ist.

Sicherheitshinweis für den Anwender: Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, dass der erwärmte Wärmeträger nicht bei einer höheren Temperatur als vorgesehen angewendet wird. Die Behandlungsdauer beträgt ca. 25 - 50 Minuten. Um die behandelnde Fläche zu vergrößern, legt man entsprechend zwei oder mehrere Wärmeträger aneinander.

Zur besonderen Beachtung: Zum eigenen Schutz sollte der Anwender während der Erwärmung des Wärmeträgers und der Vorbereitung zur Anwendung beim Patienten Schutzhandschuhe tragen. Nicht im Wasserbad kochen lassen. Vor dem Auflegen durch Drücken auf Dichtigkeit prüfen. Nicht mit scharfen oder kantigen Gegenständen die Außenfolie beschädigen. Den Wärmeträger in kaltem Zustand nicht fallen lassen, da sonst mit einer Beschädigung der Folie zu rechnen ist. Der Wärmeträger eignet sich besonders gut für Wärmeschränke. Ein sorgsamer Umgang beim Tragen des Wärmeträgers (flach, plan, horizontal, nicht geknickt, nicht gedreht oder nach unten hängend, z.B. durch Fassen der Lasche, nicht werfen, nicht fallen lassen) vermeidet eine stärkere Belastung der Folie.

Produktentsorgung: Verbrauchte oder nicht verwendete Produkte werden als Restabfall oder als sortierte Abfälle entsorgt, gemäß den örtlichen Vorschriften.